

CHECKPOINT

ALCOHOLIMETRO



El examen "CheckPoint" del Alcohol en el Aliento es un método simple y conveniente para detectar el uso del alcohol y para calcular los niveles de intoxicación alcohólica.

Fácil de usar, detecta casos positivos de alcohol a partir de .02% grados BAC por lo que se recomienda especialmente para casos de pruebas en ambientes de Tolerancia Cero.

VENTAJAS

Sencillo de utilizar: El aparato de CheckPoint usa una reacción química que produce un cambio de color para indicar la presencia del alcohol. El operador va a leer el examen observando a ver si nota que hay o no un cambio de color.


Altamente recomendable: Checkpoint es ideal para utilizarlo en programas médicos, terapéuticos y por fuerzas del orden dentro de las correccionales.

Desechable: Checkpoint es un aparato desechable que está diseñado para que lo use sólo una vez de manera rápida y sencilla.

El examen del alcohol Checkpoint da resultados más consistentes y precisos cuando cada persona sopla la misma cantidad de aire al dispositivo.

El Silbato reusable se coloca a un extremo del examen CheckPoint. Cuando el sujeto sopla, el Silbato suena indicándole al examinador que el sujeto está soplando una cantidad adecuada de aire por el dispositivo. El examinador puede tomarle el tiempo según el sonido, asegurándose de que el individuo sopla 12 segundos de aire. A los Silbatos se les desconecta del dispositivo CheckPoint y pueden ser utilizados por lo menos 12 veces más.

MODO DE USO

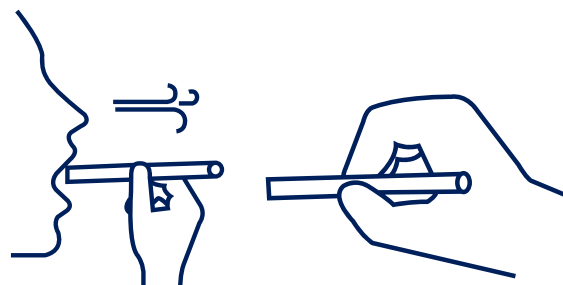

- 1 Para hacer un examen con el CheckPoint, el examinador aprieta el tubo una vez para romper la ampolla en el tubo, y luego solicita al sujeto que sopla desde un extremo del tubo por 12 segundos.
- 2 Cualquier cantidad de alcohol en el aliento hace que los cristales amarillos se conviertan en un color verde o azul dentro de dos minutos.
- 3 Los cristales amarillos pierden su color o cambian a azul o verde con la presencia del alcohol.

