

PRUEBA RÁPIDA D-CHECK CLAMIDIA



DESCRIPCIÓN:

El Dispositivo de Prueba Rápida D-Check Clamidia (Hisopo/Orina) es un inmunoensayo visual rápido para la detección cualitativa y presuntiva de Chlamydia trachomatis en muestras de hisopo cervical femenino, hisopo uretral masculino y orina masculina. Este kit está destinado a utilizarse como ayuda en el diagnóstico de la infección por Chlamydia.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD


- El kit debe almacenarse a 2-30°C hasta la fecha de caducidad impresa en el sobre sellado.
- La prueba debe permanecer en el sobre sellado hasta su uso.
- No congelar.
- Se debe evitar la contaminación de los componentes del kit. No utilizar si hay evidencia de contaminación microbiana o precipitación. La contaminación biológica de equipos de dispensación, contenedores o reactivos puede generar resultados incorrectos.

PRECAUCIONES

- Solo para uso profesional en diagnóstico in vitro.
- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el paquete. No usar la prueba si el sobre de aluminio está dañado. No reutilizar las pruebas.
- Este kit contiene productos de origen animal. El conocimiento certificado del origen y/o estado sanitario de los animales no garantiza completamente la ausencia de agentes patógenos transmisibles. Por lo tanto, se recomienda tratar estos productos como potencialmente infecciosos y manipularlos observando las precauciones de seguridad habituales (por ejemplo, no ingerir ni inhalar).
- Evitar la contaminación cruzada de las muestras utilizando un nuevo contenedor de recolección para cada muestra obtenida.
- Leer atentamente todo el procedimiento antes de realizar la prueba.
- No comer, beber ni fumar en el área donde se manipulan las muestras y los kits. Manipular todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Seguir las precauciones establecidas contra riesgos microbiológicos durante todo el procedimiento y aplicar los procedimientos estándar para la eliminación adecuada de las muestras.

- Usar ropa protectora como batas de laboratorio, guantes desechables y protección ocular al analizar muestras.
- No intercambiar ni mezclar reactivos de diferentes lotes.
- La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente los resultados.
- Una vez finalizado el procedimiento de análisis, deseche los hisopos con cuidado tras esterilizarlos en autoclave a 121° C durante al menos 20 minutos. Como alternativa, puede tratar los hisopos con hipoclorito de sodio al 0,5 % (es decir, lejía doméstica) durante una hora antes de desecharlos.
- Los materiales de prueba usados deben desecharse de acuerdo con la normativa local.
- No utilice cepillos de citología en pacientes embarazadas.

MODO DE USO

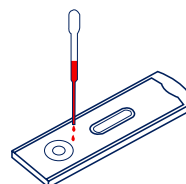

- 1 Saque el dispositivo de prueba de la bolsa de aluminio sellada y úselo lo antes posible. Se obtendrán mejores resultados si la prueba se realiza inmediatamente después de abrir la bolsa de aluminio.
- 2 Extraiga la muestra según la metodología seleccionada.
- 3 Espere a que aparezcan las bandas de color. El resultado debe leerse a los 10 minutos. No lo interprete después de 20 minutos.



Conmutador: 81 8040.2972

Diinsel S.A. de C.V. | Venezuela 342, Col. Vista Hermosa | Monterrey | 64620

Búscanos en



diinsel.com




Para muestras de hisopado endocervical o uretral:

- 1 Coloque un tubo de extracción limpio en la estación de trabajo. Añada 8 gotas del reactivo A al tubo de extracción. Sumerja el hisopo del paciente en el tubo de extracción y espere 2 minutos. Mientras espera, gire el hisopo con movimientos circulares contra el lateral del tubo de extracción para que el líquido salga y se reabsorba.
- 2 Añada 8 gotas del reactivo B. Presione el hisopo firmemente contra el tubo para expulsar la mayor cantidad de líquido posible durante 1 minuto. Deseche el hisopo siguiendo instrucciones para la manipulación de agentes. Coloque la punta del gotero en la parte superior del tubo de extracción.
- 3 La muestra extraída puede permanecer a temperatura ambiente durante 60 minutos sin afectar el resultado de la prueba.

Para muestras de orina masculina:

- 1 Añada 8 gotas del reactivo A al sedimento de orina en el tubo de centrifuga y, con una pipeta, mezcle vigorosamente hasta que la suspensión esté homogénea.
- 2 Transfiera toda la solución del tubo de centrifuga a un tubo de extracción. Deje reposar 2 minutos. Mantenga el frasco del reactivo B en posición vertical y añada 8 gotas del reactivo B al tubo de extracción. Agite con vórtex o golpee ligeramente el fondo del tubo para mezclar la solución. Deje reposar 1 minuto.
- 3 Añada 3 gotas (aproximadamente 100 µL) de la muestra extraída del tubo de extracción al pocillo para muestra (S) del casete de prueba. Evite que queden burbujas de aire atrapadas en el pocillo de muestra (S) y no agregue ninguna solución a la ventana de resultados. A medida que la prueba comience a funcionar, el color migrará a través de la membrana.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

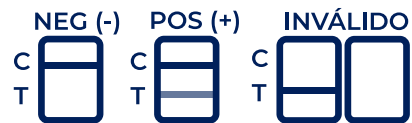

Conmutador: 81 8040.2972

Diinsel S.A. de C.V. | Venezuela 342, Col. Vista Hermosa | Monterrey | 64620

Búscanos en



diinsel.com

