

PRUEBA RÁPIDA D-CHECK MIOGLOBINA



DESCRIPCIÓN:

El Dispositivo de Prueba Rápida de Mioglobina (Sangre Total/Suero/Plasma) es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de mioglobina humana en sangre total, suero o plasma como ayuda en el diagnóstico de infarto de miocardio (IM).


ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

- Almacene en el empaque sellado, ya sea a temperatura ambiente o refrigerado (2-30°C).
- La prueba es estable hasta la fecha de vencimiento impresa en el empaque sellado.
- La prueba debe permanecer en el empaque sellado hasta su uso.
- No usar después de la fecha de vencimiento.

PRECAUCIONES

- Solo para uso profesional.
- Solo para uso diagnóstico in vitro.
- No coma, beba ni fume en el área donde se manipulan las muestras o los kits.
- No use la prueba si el empaque está dañado.
- La humedad y las altas temperaturas pueden afectar negativamente los resultados.
- El dispositivo de prueba debe permanecer en el empaque sellado hasta su uso.
- Use ropa de protección, como batas de laboratorio, guantes desechables y protección ocular al manipular las muestras.
- Manipule todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Observe las precauciones establecida contra peligros microbiológicos durante toda la prueba y siga los procedimientos estándar para la eliminación adecuada de las muestras.

MODO DE USO

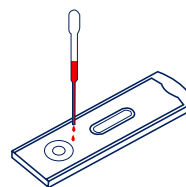

Deje que la prueba y/o los controles alcancen la temperatura ambiente (15-30°C) antes de realizar la prueba.

- 1 Para muestras de suero o plasma: Sostenga el gotero verticalmente y transfiera 2 gotas de suero o plasma (aproximadamente 50 µL) al pocillo de muestras (S) del dispositivo de prueba, luego inicie el temporizador.
- 2 Para muestras de sangre total recolectada por venopunción: Sostenga el gotero verticalmente y transfiera 3 gotas de sangre total de venopunción (aproximadamente 75 µL) al pocillo de muestras (S) del dispositivo de prueba, luego agregue 1 gota de buffer (aproximadamente 40 µL) e inicie el temporizador.
- 3 Espere a que aparezcan las líneas de color. Lea los resultados a los 10 minutos. No interprete los resultados después de 20 minutos.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS



Conmutador: 81 8040.2972

Diinsel S.A. de C.V. | Venezuela 342, Col. Vista Hermosa | Monterrey | 64620

Búscanos en



diinsel.com

