

PRUEBA RÁPIDA D-CHECK CEA

(Sangre Total/Suero/Plasma)



DESCRIPCIÓN:

La Prueba Rápida D-Check CEA (Sangre Total/Suero/Plasma) es un inmunoensayo visual rápido para la detección cualitativa presuntiva del antígeno carcinoembrionario (CEA) humano en muestras de sangre total, suero o plasma humano. Este kit está destinado a ser utilizado como una ayuda en el diagnóstico de diversos tipos de cáncer.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD


- El kit debe almacenarse a 2-30°C hasta la fecha de caducidad impresa en el sobre sellado.
- La prueba debe permanecer en el sobre sellado hasta su uso.
- No congelar.
- Se debe evitar la contaminación de los componentes del kit. No utilizar si hay evidencia de contaminación microbiana o precipitación. La contaminación biológica de equipos de dispensación, contenedores o reactivos puede generar resultados incorrectos.

PRECAUCIONES

- Solo para uso profesional en diagnóstico in vitro.
- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el paquete. No usar la prueba si el sobre de aluminio está dañado. No reutilizar las pruebas.
- Este kit contiene productos de origen animal. El conocimiento certificado del origen y/o estado sanitario de los animales no garantiza completamente la ausencia de agentes patógenos transmisibles. Por lo tanto, se recomienda tratar estos productos como potencialmente infecciosos y manipularlos observando las precauciones de seguridad habituales (por ejemplo, no ingerir ni inhalar).
- Evitar la contaminación cruzada de las muestras utilizando un nuevo contenedor de recolección para cada muestra obtenida.
- Leer atentamente todo el procedimiento antes de realizar la prueba.
- No comer, beber ni fumar en el área donde se manipulan las muestras y los kits. Manipular todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Seguir las precauciones establecidas contra riesgos microbiológicos durante todo el procedimiento y aplicar los procedimientos estándar para la eliminación adecuada de las muestras.

- Usar ropa protectora como batas de laboratorio, guantes desechables y protección ocular al analizar muestras.
- No intercambiar ni mezclar reactivos de diferentes lotes.
- La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente los resultados.

MODO DE USO

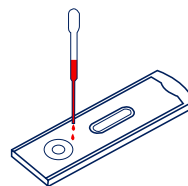

- 1 Retirar la prueba de su sobre sellado y colocarla sobre una superficie limpia y nivelada. La prueba debe realizarse dentro de una hora.
- 2 Transferir 3 gotas de sangre total/suero/plasma al pozo de muestra (S) del dispositivo con la pipeta desechable provista o dejar caer 3 gotas colgantes de sangre total obtenida por punción en el dedo, y comenzar a cronometrar.
- 3 Si la prueba no migra a través de la membrana después de 1 minuto, agregar 1 gota de buffer al pozo de muestra (S).
- 4 Esperar a que aparezcan las bandas coloreadas. Leer el resultado a los 10 minutos. No interpretar el resultado después de 20 minutos.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS



Conmutador: 81 8040.2972

Diinsel S.A. de C.V. | Venezuela 342, Col. Vista Hermosa | Monterrey | 64620

Búscanos en



diinsel.com

